



GEBRUIKSAANWIJZING FORMAFOAM B.V.

ANTI DECUBITUS MATRASSEN EN MEDISCHE MATRASSEN

Hartelijk dank voor de aanschaf van een medische of antidecubitus Formafoam matras.
Onze anti decubitus matrassen dragen bij aan het voorkomen van decubitus en ondersteunen een spoedig herstel van (decubitus) wonden. Alle medische Formafoam matrassen zijn CE gecertificeerd.

Algemeen advies:

Plaats de matras in het (verpleeg)bed en gebruik altijd een matrasmaat die aansluit op de bed ombouw.

Geen matrassen op elkaar leggen.

In gebruik nemen:

- Verwijder de plastic zak
- Plaats de matras in het bed en zorg dat de matras met de juiste (antidecubitus) zijde naar boven geplaatst zal worden.
- Alle ritsen van de matrashoes dienen gesloten te zijn
- De matras is ook geschikt voor een beweegbaar bed
- Laat geen brandende voorwerpen in contact komen met de matras
- Laat geen scherpe voorwerpen, naalden en bijtende stoffen in aanraking komen met de matrashoes
- Volg altijd de wasvoorschriften die vermeld staan op het label aan de matrashoes



Reiniging & Desinfectie:

Raadpleeg onze onderhoudsinstructies voor de juiste reiniging en desinfectie van de matrashoezen.
Zorg dragen voor het hygiënisch afvoeren van eventuele gecontamineerde matrassen.

Opslag:

De matrassen schoon, droog en bij voorkeur op kamertemperatuur opslaan

Aansprakelijkheid:

Noch de fabrikant noch de distributeur zijn aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van een Formafoam matras.