



GEBRUIKSAANWIJZING FORMAFOAM B.V.

Medische hoofdkussens

Hartelijk dank voor de aanschaf van een Formafoam hoofdkussen.
Alle medische Formafoam hoofdkussens zijn CE gecertificeerd.

Algemeen advies:

Het medisch hoofdkussen is in te zetten bij oor-decubitus of decubitus op het achterhoofd.
Tevens kan dit dienen als hoofdkussen voor een comfortabele ligging.

In gebruik nemen:

- Verwijder de plastic zak
- Plaats het hoofdkussen aan het hoofdeinde van de patiënt en zorg ervoor dat het oor of het deel van het hoofd waar het kussen voor bedoeld is zo goed mogelijk vrij komt te liggen
- De rits van de hoofdkussenhoes dient gesloten te zijn
- Laat geen brandende voorwerpen in contact komen met het hoofdkussen
- Laat geen scherpe voorwerpen, naalden en bijtende stoffen in aanraking komen met het hoofdkussen

Reiniging & Desinfectie:

Volg altijd de wasvoorschriften die vermeld staan op het label aan de hoofdkussenhoes
Zorg dragen voor het hygiënisch afvoeren van eventuele gecontamineerde hoofdkussens

Opslag:

De hoofdkussens schoon, droog en bij voorkeur op kamertemperatuur opslaan

Aansprakelijkheid:

Noch de fabrikant noch de distributeur zijn aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van een Formafoam hoofdkussen.