



## GEBRUIKSAANWIJZING FORMAFOAM B.V.

### *Medische zitkussens*

Hartelijk dank voor de aanschaf van een Formafoam zitkussen.  
Alle medische Formafoam zitkussens zijn CE gecertificeerd.

### Algemeen advies:

Plaats het zitkussen in de (rol)stoel of op de zitplaats.

### In gebruik nemen:

- Verwijder de plastic zak
- Plaats het zitkussen in de (rol)stoel en zorg dat het zitkussen met de juiste zijde naar boven gelegd wordt
- De rits van de zitkussenhoes dient gesloten te zijn
- Laat geen brandende voorwerpen in contact komen met het zitkussen
- Laat geen scherpe voorwerpen, naalden en bijtende stoffen in aanraking komen met het zitkussen
- Volg altijd de wasvoorschriften die vermeld staan op het label aan de zitkussenhoes



### Reiniging & Desinfectie:

Raadpleeg onze onderhoudsinstructies voor de juiste reiniging en desinfectie van de zitkussenhoezen.  
Zorg dragen voor het hygiënisch afvoeren van eventuele gecontamineerde zitkussens

### Opslag:

De zitkussens schoon, droog en bij voorkeur op kamertemperatuur opslaan

### Aansprakelijkheid:

Noch de fabrikant noch de distributeur zijn aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van een Formafoam zitkussen.