



## ONDERHOUDSINSTRUCTIES VOOR REINIGING EN DESINFECTIE VAN DE HOEZEN VAN MATRASSEN EN ZITKUSSENS

Om een maximale levensduur te behalen uit de hoezen is het belangrijk dat deze met zorg worden behandeld.

### Gelieve aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

1. Bij elke grote bevuilding van de hoes adviseren wij over te gaan tot een integrale was van de hoes.
2. Minimum maandelijks controle van de binnenzijde van de hoes.  
Wanneer hier een verkleuring wordt vastgesteld, industrieel wassen.
3. Registreren van het aantal wasbeurten per hoes zodat elke behandeling kan worden getraceerd.
4. De gebruikte wasproducten toetsten aan de producten geadviseerd voor de industriële was.  
Bij eventuele twijfel, contact opnemen met de leverancier om samen een test uit te voeren.
5. Bij het manueel reinigen op de matras, werken met de reinigings- en ontsmettingsproducten op basis van alcohol en water.  
Een chlooroplossing van 1000ppm kan gebruikt worden indien dit noodzakelijk is.
6. Na elke vorm van reiniging voldoende spoelen met lauw water.  
Resten van chloor en ontsmetting zullen de levensduur gevoelig verminderen! Indien dit niet naar behoren gedaan is zal de polyurethaan coating hard en poreus worden en door mechanische bewegingen openscheuren.  
Dit zal dan ook enkel op plaatsen zijn waar spoelen niet of slecht uitgevoerd is.
7. Verhindern dat de hoes wordt blootgesteld aan chemische producten die negatief kunnen inwerken op de coating. (zuren, chemicaliën).

